



1

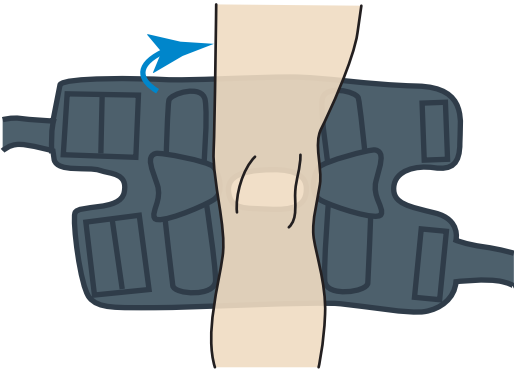

Arrange the device as pictured above. Wrap the side around the front of the knee. Proceed to Step Two and align top.

Organice el dispositivo como se muestra arriba. Envuelva el lado alrededor de la parte delantera de la rodilla. Continúe con el Paso Dos y alinee la parte superior.


2

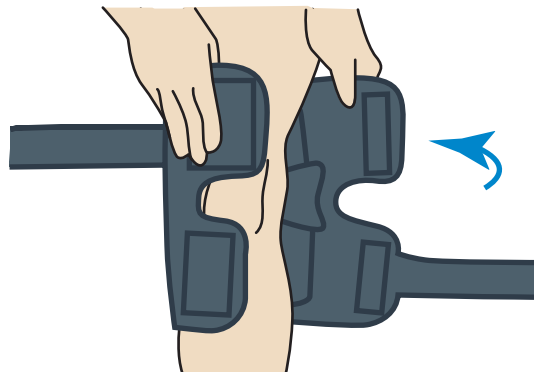

Wrap the other side around the front of the knee. Place over first side using Velcro to hold in place.

Envuelva el otro lado alrededor de la parte delantera de la rodilla. Coloque sobre el primer lado usando Velcro para mantenerlo en su lugar.


3

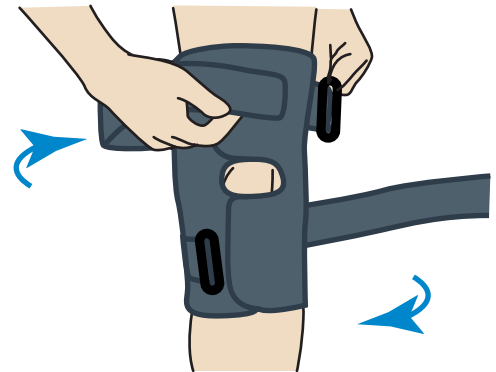

Insert the top strap through the loop at the top. Repeat the step with the bottom strap.

Inserta la correa superior a través del lazo en la parte superior. Repita el paso con la correa inferior.

4

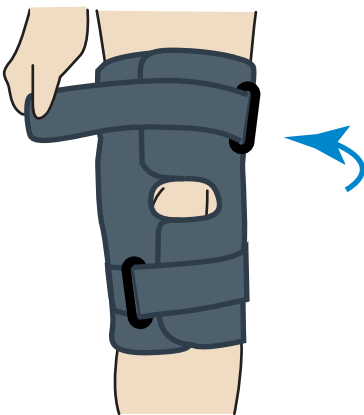

Tighten each strap to comfort and wrap each strap to device.

Aprieta cada correa para mayor comodidad y envuelve cada correa al dispositivo.

Mana **HINGED KNEE**



MANAMED™

Mana **HINGED KNEE**

Warnings

Warning: This device will not prevent or eliminate risk of injury. Do not over tighten. If Swelling, pain, skin irritation or an unusual reaction occurs, discontinue use immediately and consult your medical professional. This device should not be worn by persons with known allergies to neoprene.

Care and Washing Instructions

Hand wash using mild soap. Rinse thoroughly. Air dry only. Do not tumble dry.

Advertencias

Advertencia: Este dispositivo no evitará ni eliminará el riesgo de lesiones. No apriete demasiado. Si se produce hinchazón, dolor, irritación de la piel o una reacción inusual, suspenda el uso de inmediato y consulte a su médico. Este dispositivo no debe ser usado por personas con alergias conocidas al neopreno.

Instrucciones de cuidado y lavado

Lave a mano usando jabón suave. Enjuague bien. Secado al aire solamente. No secar en secadora.

Hinged Knee Orthosis
Instructions for use

Órtesis articulada de la rodilla
Instrucciones de uso



5240 W Charleston Blvd.
Las Vegas NV 89146
United States
Ph: 888-508-0712
www.ManaMed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany